



THD SLIDE DOPPLER PROBE

800056	800063
NON STERILE - PLURIUSO	STERILE - MONOUSO
	
5 utilizzi (90 min/utilizzo)	1 utilizzo – 90 min

Utilizzo

Le sonde THD Slide Doppler Probe sono destinate ad essere utilizzate in combinazione con THD Revolution, per il trattamento chirurgico della patologia emorroidaria, utilizzando la tecnica di dearterializzazione emorroidaria transanale guidata da sonda Doppler.

Descrizione generale

Le sonde THD Slide Doppler Probe sono destinate ad essere utilizzate con i kit THD Slide in quanto sono state progettate per la massima sensibilità nell'individuazione delle arterie associate ad una dimensione ridotta per lasciare la piena libertà di movimento al chirurgo. Lasciando contemporaneamente spazio nel campo operatorio.

Le sonde THD Slide Doppler Probe sono disponibili sia riutilizzabili (per un numero limitato di trattamenti) che monouso.

Le sonde Doppler monouso sono confezionate singolarmente e sono disponibili solo STERILI.

Le sonde Doppler sono sterilizzate tramite Ossido di Etilene (EtO).



Caratteristiche dimensionali	
THD Doppler Probes monouso o pluriuso	
	
Dimensioni del corpo sonda	14x70x7 mm
Lunghezza del cavo	2000 mm

Information		
REF	TRADE NAME	Sterilizzazione - Risterilizzazione
800056	THD DOPPLER PROBE 5s/NS	EtO, Plasma Gas (Perossido di Idrogeno, con sistema Sterrad,) o Acido Peracetico con Sistema Steris. * Non sterilizzare in autoclave o comunque a temperature superiori a 70°C.
800063	THD DOPPLER PROBE 1s/ST	STERILE – Ri-Sterilizzazione NON AMMESSA

* Il metodo di sterilizzazione deve essere validato dall'utilizzatore finale.

THD Slide Doppler Probe				
REF	Q.tà	DESCRIZIONE	N° RDM	EMDN
800056	1	THD DOPPLER PROBE 5s/NS – Non sterile, 5 utilizzi	2558123	Z12059005
800063	1	THD DOPPLER PROBE 1s/ST – Sterile, monouso, un solo utilizzo	2558142	Z12059005