



THD PRESSPROBE



THD PressProbe è l'innovativa sonda monouso da utilizzare con il dispositivo Anopress, per effettuare un esame di manometria anale THD.

La sonda consente la misurazione della pressione reale del tono sfinteriale medio nelle diverse attivazioni funzionali (tono basale, di squeeze e di strain).

La sonda THD Pressprobe va utilizzata esclusivamente in combinazione al dispositivo Anopress.

La sonda THD Pressprobe non necessita di taratura in quanto questa avviene automaticamente all'avvio di ogni procedura.

La sonda è dotata di un'impugnatura ergonomica e presenta una punta completamente atraumatica, garantendo il massimo comfort al personale medico e al paziente durante l'esame ed è stata dimensionata per riprodurre le condizioni che si presentano durante una normale esplorazione digitale.

Nella confezione è presente una Probe Card che consente la registrazione dell'esame.



Caratteristiche THD Probe	
Diametro membrana	16 mm
Lunghezza sonda	165 mm (compreso il manico)
Lunghezza zona sensibile (membrana)	50 mm
Lunghezza linea	1000 mm
Peso	23 g
Connessione con Anopress	Luer Lock maschio

PressProbe – PressKit*					
REF	Denominazione	Q.tà	Descrizione	N° RDM	CND
800147	THD PRESSPROBE (BOX)	10	Sonda per manometria anale (scatola)	1340646	G020399
800150	THD PRESSPROBE (ENV)	50	Sonda per manometria anale (busta)	1340641	G020399

*vedere scheda tecnica cod. 800040, 800134, 800165 e 800166

DISPOSITIVI COLLEGATI				
Cod.	Denominazione	Descrizione	N° RDM	CND
800140	THD ANOPRESS	Dispositivo per la manometria Anoretale	114412	Z120701
800198	THD PROCTOSTATION	Piattaforma Proctologica Integrata	120834	Z11040182
800194	THD PROCTO MOBILE	Piattaforma Proctologica Portatile	120863	Z11040182