


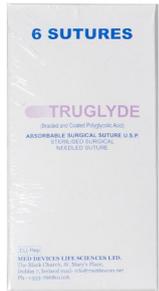

# THD SLIDE ENV

<b>THD SUTURE</b>	<b>THD SLIDE ENV</b>	<b>THD DOPPLER PROBE</b>
		

## Utilizzo

THD Slide è stato specificatamente disegnato per un utilizzo immediato con il dearterializzatore THD Revolution.

## Descrizione Generale

THD Slide è un anoscopio/proctoscopio appositamente progettato per un miglior utilizzo della procedura THD nel trattamento dei gradi più alti della patologia emorroidaria. La particolare forma dell'anoscopio/proctoscopio Slide, con la presenza di un carrello estraibile rende possibile realizzare legatura e risoluzione del prollasso con un solo strumento, causando quindi un minor disagio al paziente e velocizzando la procedura. L'anoscopio/proctoscopio THD Slide è realizzato in materiale plastico medico trasparente, per permettere, insieme all'utilizzo di un puntale a fibre ottiche appositamente sagomato, un'illuminazione perfetta del campo operatorio. L'anoscopio/proctoscopio specifico THD Slide è appositamente progettato per dare la giusta tensione alla cavità anale durante l'intervento e ha un apposito alloggiamento per il porta ago THD. La sonda doppler fornita si inserisce all'interno dell'anoscopio/proctoscopio ed è a diretto contatto con la mucosa per una precisa identificazione delle arterie emorroidarie. Il box comprende 1 sonda doppler riutilizzabile da 10 utilizzi, 10 confezioni di suture per legature da 6 suture cadauna e 1 portaghi pluriuso.



Caratteristiche dimensionali	
THD SLIDE ENV	
Dimensione interna	27x19 mm
Dimensione esterna	33x23 mm
Lunghezza operatoria	100 mm
Finestra operativa (Variabile)	30x10 mm minima
Lunghezza totale	172 mm
Lunghezza manico	105 mm

THD Slide Env					
REF	Q.tà	Descrizione	Classe di rischio	N°RDM	EMDN
800168-10	10	THD Slide Env	-	143660	-
include 710009	10	THD Slide Env (sterile) in busta - con 1 proctoscopio con carrello, 1 spinginodo	Ila	2558154	Z12020604
include 700001	1	Sonda Doppler per 10 utilizzi	Ila	2558128	Z12059005
include 880000	10	Confezione di suture (6 suture - sterili)	III	2333893	H010101020101
include 750001	1	Portaqli pluriuso	I	2214827	L0205

Dispositivi associati		
REF	Qtà	Descrizione
800133	1	THD REVOLUTION