



# THD FACE MASK

## THD F4 navybarrier



Made in Italy



NOTA: Le immagini hanno il solo scopo di presentare il prodotto; si rimanda alla tabella dei codici prodotto per varianti disponibili.

### CLASSIFICAZIONE:

Dispositivo medico di Classe I secondo Regolamento (UE) 2017/745

### TIPO

Maschera facciale ad uso medico di **tipo IIR**, monouso, non sterile, latex free.

### DESTINAZIONE D'USO

**THD Face Mask – THD F4 navybarrier** è un dispositivo medico monouso non sterile destinato a ridurre l'emissione di agenti infettivi dal naso e dalla bocca di personale sanitario e/o di un portatore asintomatico o di un paziente con sintomi clinici.

### DESCRIZIONE

**THD F4 navybarrier** è classificata come mascherina chirurgica di tipo **IIR** secondo standard EN 14683, idonea a coprire bocca, naso e mento di chi la indossa e assicurando una stretta adesione ai lati.

**THD F4 navybarrier** è specificatamente progettata **per limitare la trasmissione di agenti infettivi dal naso e dalla bocca di personale sanitario e/o di un portatore asintomatico o di un paziente con sintomi clinici** con un'Efficienza di Filtrazione Batterica (BFE) superiore al 99%, grazie ad un multistrato di TNT in polipropilene e poliestere con strato filtrante interno.

**THD F4 navybarrier** è inoltre specificatamente testata per la **resistenza agli spruzzi** (schizzi di sangue o liquidi sintetici) con una pressione di almeno 16 kPa (ISO 22609).

Le efficienti proprietà di filtraggio e la buona vestibilità della mascherina chirurgica **THD F4 navybarrier** forniscono una valida soluzione in termini di:

- **Comfort:** Lo strato a contatto con la pelle è morbido e non abrasivo. I morbidi elastici assicurano che la maschera aderisca strettamente ai lati del viso di chi la indossa con il massimo confort.
- **Protezione:** lo strato interno garantisce le proprietà filtranti bloccando più del 99% della penetrazione degli agenti infettivi.
- **Alta respirabilità:** il materiale consente un'agevole flusso d'aria in entrambe le direzioni.

### CARATTERISTICHE:


- Ottima resistenza alla penetrazione batterica con **potere filtrante BFE > 99%**
- **Resistenza agli spruzzi** con una pressione di almeno 16 kPa
- Buona permeabilità all'aria che garantisce un'**alta respirabilità**
- Ottima vestibilità ed elastici confortevoli
- Composta da **quattro** strati di TNT
- Adattatore nasale conformabile, utile per ridurre l'appannamento degli occhiali
- Buona resistenza alla trazione sia longitudinale che trasversale
- Ultraleggera
- Ipoallergenica
- Grado di contaminazione (bioburden): inferiore a 30 UFC/g

**MATERIALI:** Tessuto Non Tessuto (TNT) – Spunbond/Meltblown

**COMPOSIZIONE CHIMICA:** polipropilene, poliestere



## SCHEMA DI FUNZIONAMENTO/UTILIZZO:

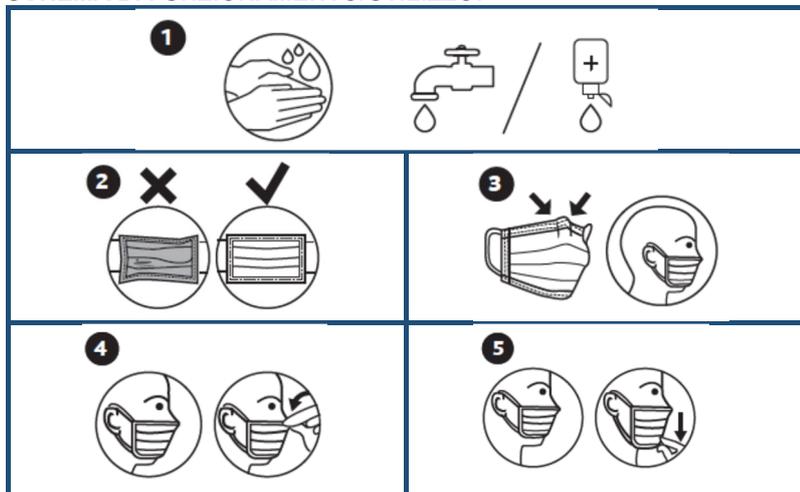

**MANUTENZIONE:** Non necessaria, dispositivo monouso.

**CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE DEL DISPOSITIVO:** Conservare a temperatura ambiente, senza esporre ad umidità o calore diretto.

**PRECAUZIONE DI UTILIZZO:** Non utilizzare in caso di evidenti difetti quali TNT danneggiato, bucato o scucito.

**CONTROINDICAZIONI:** Non ci sono particolari controindicazioni nell'utilizzo di questo dispositivo medico.

**MODALITÀ DI TRASPORTO E SMALTIMENTO:** Non ci sono particolari osservanze cui attenersi nel trasporto. Lo smaltimento va effettuato nei contenitori dei rifiuti solidi se la mascherina non risulta utilizzata. In caso di utilizzo, la mascherina dovrà essere smaltita:

- In ambito domestico, nella raccolta indifferenziata
- In ambito ospedaliero/professionale, negli appositi contenitori dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo

## Caratteristiche THD Face Mask – THD F4 navybarrier

Taglie	Regular Fit	Junior
Dimensioni – Larghezza	17,5 cm	14,5 cm
Dimensioni – Altezza (mascherina plissettata)	9,5 cm	9,5 cm
Elastici - Lunghezza	Standard	Junior
Materiale	4 strati di TNT Polipropilene/Poliestere: - 2 strati esterni e 1 strato a contatto pelle in TNT Spunbond - 1 strato intermedio con proprietà filtranti in TNT Meltblown	
Colore	Blue navy lato esterno / interno – elastici bianchi	
Sterilizzazione	Non Sterile	
Standard Applicati	EN14683 / ISO22609 / ISO10993-1	
Classificazione prodotto	Dispositivo medico di Classe I secondo Regolamento (UE) 2017/745	
Classificazione EN14683	Maschera facciale ad uso medico di Tipo IIR	
Efficienza di filtrazione batterica (BFE)	> 99%	
Pressione differenziale (Pa/cm <sup>2</sup> )	< 40	
Pulizia microbica	≤ 30 UFC/g	

REF	Denominazione	Descrizione	Taglia	Q.tà	RDM	CND
800278	THD FACE MASK F4 20 BN M R	THD F4 navybarrier - 20 pz - Regular	Regular Fit	20 pz	2127619	T020601
800279	THD FACE MASK F4 20 BN M J	THD F4 navybarrier - 20 pz - Junior	Junior	20 pz	2127719	T020601