


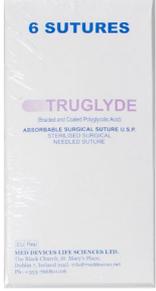

# THD SLIDE ENV

<b>THD SUTURE</b>	<b>THD SLIDE ENV</b>	<b>THD DOPPLER PROBE</b>
		

## Utilisation

Le THD SLIDE est spécifiquement conçu pour être utilisé avec le Générateur doppler THD Revolution pour faire la de-arterialisation et la Muco-pxey.


## Description générale

Le THD SLIDE est un anoscope/proctoscope spécialement conçu pour l'amélioration de la procédure de THD, tout en traitant les grades les plus élevés de la maladie hémorroïdaire. La forme spécifique del anoscope/proctoscope Slide, réduit la maladie pour le patient et accélère la procédure. La forme particulière del anoscope/proctoscope, avec le support de sonde coulissant, permet de réaliser la ligature et la réduction du prolapsus avec un seul outil. Le anoscope/proctoscope THD SLIDE est faite d'une matière plastique transparente qui permet, avec l'utilisation de la canule courbe et le câble à fibre optique, un éclair parfaite du champ opératoire. Le anoscope/proctoscope THD SLIDE est conçu pour maintenir une droit tension de la cavité anale pendant le traitement et présente loges pour le porte-aiguille THD. La sonde Doppler fourni s'adapte dans el anoscope/proctoscope et est en contact avec la muqueuse anale pour une détection précise des artères hémorroïdaires. La boîte de THD SLIDE contient 1 sonde doppler réutilisable 10 fois avec nettoyage preventif et stérilisation. La boîte contient également 10 paquets de sutures absorbables (6 points de suture à chaque paquet) et 1 porte-aiguille THD réutilisable.



**Caractéristiques dimensionnelles**

**THD SLIDE ENV**

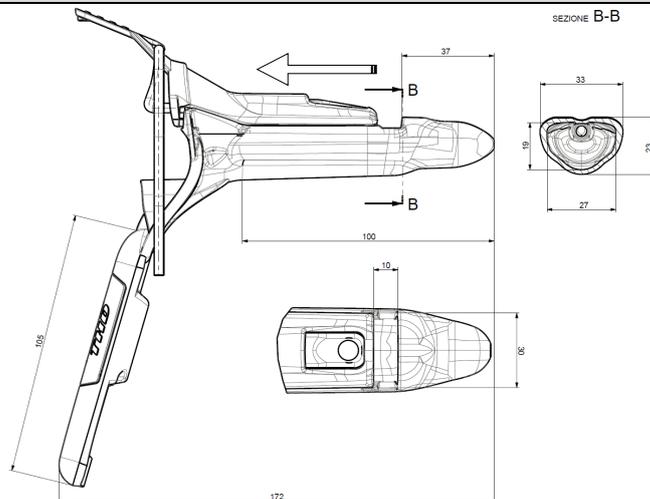

Taille interne	27x19 mm
Taille externe	33x23 mm
Longueur opérationnelle	100 mm
Taille fenêtre latérale (modifiable)	30x10 mm minimale
Longueur totale proctoscope	172 mm
Longueur manche	105 mm

**THD SLIDE ENV**

Code	Qté	Description
800168-10	10	THD Slide Env
avec 710009	10	THD Slide Env (stérile) dans un sac – avec 1 proctoscope, 1 poussoir
avec 700001	1	Sonde doppler Slide (10 usage)
avec 880000	10	Paquet contient 6 sutures absorbable (stérile)
avec 750001	1	Porte-aiguille réutilisable

**DISPOSITIFS CONNECTÉS**

Code	Qté	Description
800133	1	THD REVOLUTION