



## THD SENSYPROBE



THD SensyProbe est la sonde à usage unique innovante qui s'utilise avec le dispositif Anopress pour effectuer un examen de manométrie ano-rectale THD.

THD SensyProbe permet de mesurer la pression réelle du tonus sphinctérien moyen lors des différentes activités fonctionnelles (tonus basal, contraction et effort). De plus, grâce à un ballon présent à l'extrémité de la sonde et à une connexion via une ligne dédiée, THD SensyProbe permet d'analyser les volumes de l'ampoule rectale et donc d'évaluer la sensibilité rectale et le réflexe ano-rectal inhibiteur (cette détection étant possible après avoir gonflé le ballon avec l'accessoire dédié THD SensyProbe Accessory).

La sonde THD SensyProbe ne nécessite aucun étalonnage, celui étant effectué automatiquement au démarrage de chaque procédure avec THD Anopress.

La sonde est dotée d'une poignée ergonomique et présente une pointe totalement atraumatique, garantissant ainsi un confort maximal au patient et au personnel soignant pendant l'examen ; elle est dimensionnée de manière à reproduire les conditions d'une exploration digitale normale.

L'emballage contient une Probe Card qui permet d'enregistrer l'examen.



Caractéristiques de THD SensyProbe	
Diamètre membrane	16 mm
Diamètre ballon	16 mm - 70 mm
Longueur sonde	165 mm (poignée comprise)
Longueur zone sensible (membrane)	50 mm
Longueur ligne	1000 mm pour 2 lignes
Poids	33 g
Connexion avec Anopress	Connecteur Luer Lock mâle
Connexion avec SensyProbe Accessory	Connecteur Luer Lock femelle

RÉF 800192		THD SENSYPROBE	
Contenu et Spécifications			
Q.tà	Cod	Descrizione	Spécifications
15	710010	THD SensyProbe	THD SensyProbe + Carte sous emballage
15	750032	THD SensyProbe Accessory	Seringue + robinet 3 voies