



DESSICATEUR HAUTE FRÉQUENCE

THD DERM A942



Utilisation

Le dessiccateur haute fréquence Derm 942 est parfait pour le traitement de la dysplasie anale et pour d'autres procédures en anoscopie à haute résolution (HRA).

Description générale

Le dessiccateur haute fréquence Derm 942 est un instrument d'électrochirurgie de faible puissance, conçu pour un usage en cabinet et nécessitant peu d'entretien.

La puissance est réglable jusqu'à 40 watts par incrément de 1/10 watt pour les 10 premiers watts, ce qui offre une grande flexibilité d'emploi.

La pièce à main, stérilisable en autoclave, est munie de boutons pour le réglage de puissance (800211) et dispose d'un support en acier inoxydable pour sa fixation sur le chariot.

Données techniques	
Hauteur	18,8 cm
Largeur	22,8 cm
Profondeur	10,5 cm
Poids	< 2,6 kg
Alimentation	100-240 VAC
Fréquence d'alimentation	50-60 Hz
Fréquence de sortie	328-429 kHz

DESSICATEUR HAUTE FRÉQUENCE: ACCESSOIRES

PIÈCE À MAIN RÉUTILISABLE THD A902 RÉF 800211



La pièce à main réutilisable et stérilisable en autoclave est conçue pour être utilisée avec le dessiccateur à haute fréquence Derm 942. La pièce à main réutilisable dispose de 3 boutons : utiliser le bouton bleu pour activer la sortie monopolaire, les boutons « haut-bas » pour augmenter ou diminuer la puissance fournie par le dessiccateur à haute fréquence Derm 942. La pièce à main est stérilisable en autoclave à vapeur.

CÂBLE DE TERRE RÉUTILISABLE THD 13-5300

RÉF. 800209



Le dessiccateur haute fréquence Derm 942 peut être utilisé avec ou sans câble de terre et un pad. Pour éviter tout risque de choc électrique au personnel ou au patient, le câble de mise à la terre réutilisable peut être connecté à la plaque patient du dessiccateur haute fréquence Derm 942 et utilisé avec les plaques de mise à la terre à usage unique (800210). Ce dispositif est testé pour 100 utilisations et est vendu séparément.

DISPOSITIF DE MISE À LA TERRE THD GBS-DB1031A

RÉF 800210




La plaque de mise à la terre à usage unique est conçue pour être utilisée avec le câble de mise à la terre réutilisable (800209) pour la mise à la terre électrique du patient sans contact physique avec le personnel. Cette plaque provoque la dispersion de l'énergie provenant du dessiccateur haute fréquence Derm 942 en la renvoyant à la machine et évite ainsi tout risque de choc électrique douloureux pour le patient ou le personnel. Le dispositif est vendu séparément.



ASPIRATEUR DE FUMÉES THD 14-4010HB SMOKE EVAC. FUS.

RÉF 800212

Pour l'extraction simultanée de la fumée lors de l'utilisation du dessiccateur haute fréquence Derm 942, brancher le kit de tuyaux de dessiccateur haute fréquence Smoke-Evac Fusion à la pointe de la pièce à main réutilisable (800211) à 3 boutons et les sondes Smoke-Evac Fusion. Brancher le connecteur de 9 mm sur le port correspondant de l'aspirateur de fumées (800181).

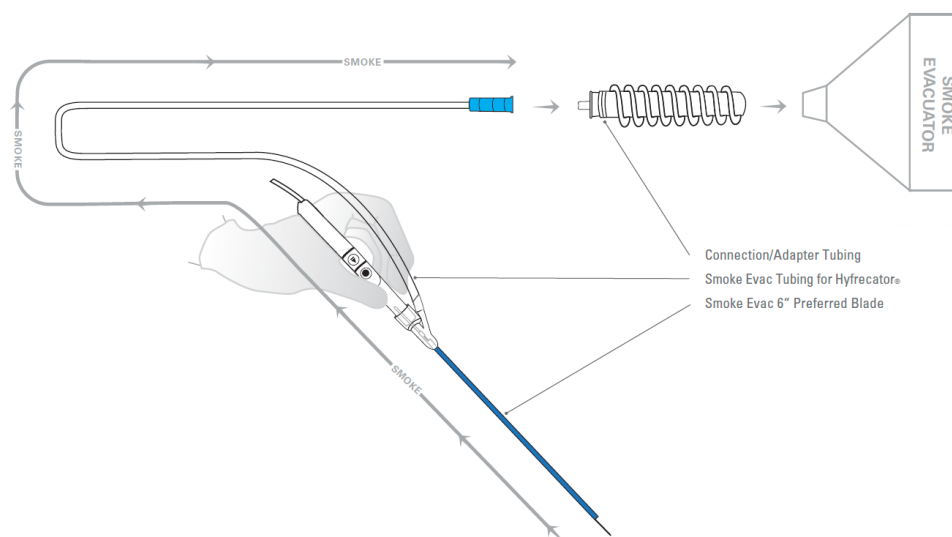

DESSICATEUR HAUTE FRÉQUENCE THD DERM A942		
Code	Qté	Description
800231	1	DESSICATEUR HAUTE FRÉQUENCE THD DERM A942
800211	1	PIÈCE À MAIN RÉUTILISABLE THD A902
800209	1	CÂBLE DE TERRE RÉUTILISABLE THD 13-5300
800210	1	DISPOSITIF DE MISE À LA TERRE THD GBS-DB1031A
800212	1	ASPIRATEUR DE FUMÉES THD 14-4010HB SMOKE EVAC. FUS.